

ANYRIDGE®



株式会社メガジェンジャパン
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-4アソルティ本町8F
TEL 06-6266-3535 FAX 06-6266-3536
Web: www.megagen.jp E-mail: info@megagen.jp

ANYRIDGE®

Key Advantages

Excellent initial stability even
at the compromised bone density

No screw loosening guaranteed!

Unique and valuable ISQ pattern;
essential for predictable immediate
or early loading.



高度管理医療機器

販売名: エニリッジ インプラントシステム 医療機器承認番号: 22800BZ100009000

指定管理医療機器

販売名: Geo CM フィット 医療機器認証番号: 228AKBZX00024000

一般医療機器

販売名: 技工用アナログ 医療機器届出番号: 40B1X10003GE0054
販売名: MegaGen 技工用パーツ 医療機器届出番号: 40B1X10003GE0063
販売名: インプレッションコーピング 医療機器届出番号: 40B1X10003GE0035
販売名: エニリッジサージカルキット 医療機器届出番号: 40B1X10003GE0035
販売名: GEO リンク 医療機器届出番号: 40B1X10003GE0058
販売名: GEO CAD スキャンボディ 医療機器届出番号: 40B1X10003GE0057

 MEGAGEN JAPAN
For Lifetime Smiles


ANYRIDGE®

Characteristics & Advantages

Design Concept

皮質骨の保存を考慮したナロープラットフォームとワイドスレッド

プラットフォーム径に対してスレッド径を大きく設定することで、側方圧をスレッド部で緩衝させ皮質骨部への負担を軽減させます。これにより十分なボリュームの皮質骨を保存させるとともに、周囲粘膜の厚みも確保することができ、長期における骨内安定性と審美性が実現します。

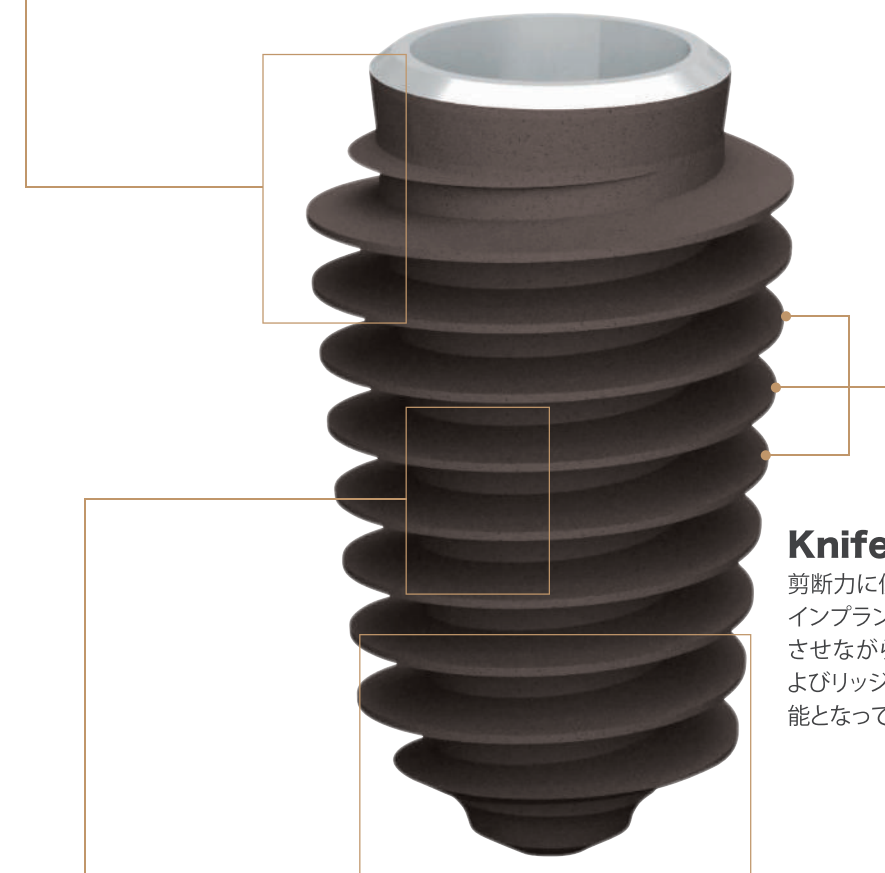


Knife-Thread®

剪断力に優れたスレッドデザインによって、インプラント埋入時に骨の圧縮抵抗を軽減させながら、効果的にボーンコンデンスおよびリッジエクспанションを行うことが可能となっています。

S-L-A surface

インプラント表面処理は臨床的にも評価が高いS-L-A(Sandblasting with large grit and acid etching)を採用しています。

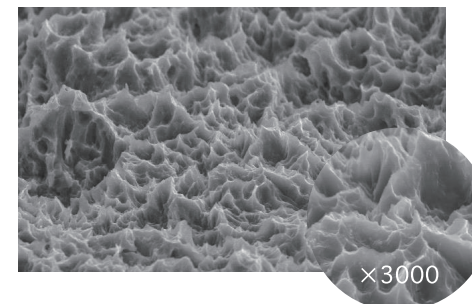


カッティングスリットを有さないスライス型セルフタッピング

テーパー状に配置された鋭利なスレッドが骨を段階的にスライスおよび圧縮するため初期固定に優れたセルフタッピングです。カッティングスリットを有さないので、骨内における骨硬度の差(骨質の分布状況)などに影響を受けにくい正確な埋入操作が可能です。前歯部の抜歯即時埋入などにも有利なデザインになっています。

Prosthetics

Magic Five (5° Internal connection)


独自の5°モーステーパー嵌合は、インプラント・アバットメント接合部において高い封鎖性と結合力を発揮します。これによりスクリューの緩みやマイクロムーブメントが制御されることで、骨吸収の一因とされる接合部に対する軟組織の炎症性細胞浸潤の発生を防止し辺縁骨の長期的な安定が維持されます。

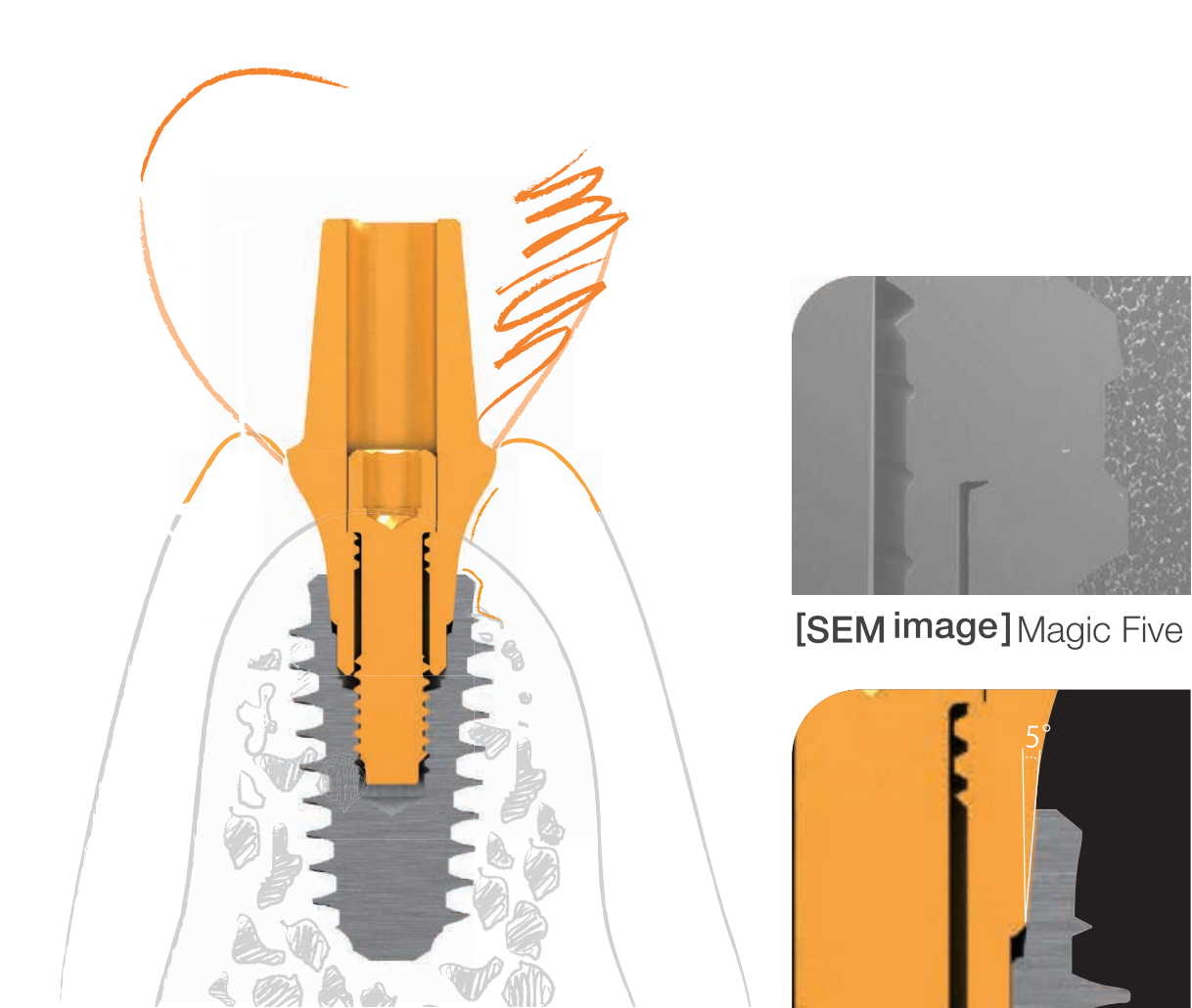

Maintenance

研究を重ねたデザインによってインプラントの周囲組織の長期安定を実現

AnyRidge®は初期固定時の維持や咬合力などの口腔機能圧に対する抵抗性を皮質骨に依存しません。その結果、皮質骨に加わるストレスが低減され、長期にわたり安定したインプラント周囲組織が維持されます。

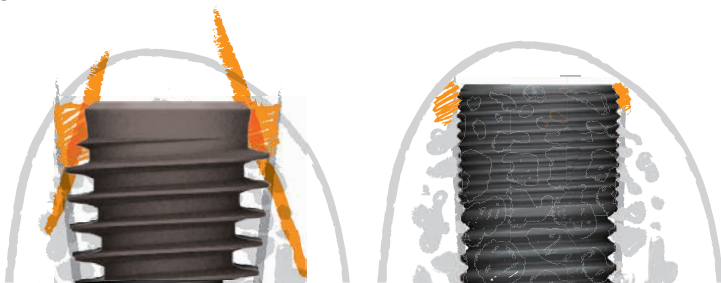

Fixture Products



Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø6.5	Fixture Diameter
Ø2.8	Ø3.3	Ø3.3	Ø3.3	Ø3.3	Ø4.8	Ø4.8	Core Diameter
							Core diameter measured at 3.5mm under

ANYRIDGE®

Fixture Size

Small Ø3.5

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
3,5	7	FANIHS3507
	8,5	FANIHS3508
	10	FANIHS3510
	11,5	FANIHS3511
	13	FANIHS3513
	15	FANIHS3515
	18	FANIHS3518



Regular Ø4.0

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
4.0	7	FANIHS4007
	8,5	FANIHS4008
	10	FANIHS4010
	11,5	FANIHS4011
	13	FANIHS4013
	15	FANIHS4015
	18	FANIHS4018



Regular Ø4.5

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
4.5	7	FANIHS4507
	8,5	FANIHS4508
	10	FANIHS4510
	11,5	FANIHS4511
	13	FANIHS4513
	15	FANIHS4515



Fixture Size

Wide Ø5.0

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
5.0	7	FANIHS5007
	8,5	FANIHS5008
	10	FANIHS5010
	11,5	FANIHS5011
	13	FANIHS5013
	15	FANIHS5015



Wide Ø5.5

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
5,5	7	FANIHS5507
	8,5	FANIHS5508
	10	FANIHS5510
	11,5	FANIHS5511
	13	FANIHS5513
	15	FANIHS5515



Super Wide Ø6.0

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
6.0	7	FALIHS6007
	8,5	FALIHS6008
	10	FALIHS6010
	11,5	FALIHS6011
	13	FALIHS6013



Super Wide Ø6.5

Fixture Diameter (mm)	L (mm)	Ref.C
6.5	7	FALIHS6507
	8,5	FALIHS6508
	10	FALIHS6510
	11,5	FALIHS6511
	13	FALIHS6513



Cover Screw & Healing Abutment

Cover Screw

カバースクリュー

H (mm)	Ref.C
0.8	AANCSF3508

※カバースクリューはフィクスチャーには含まれておりません




Healing Abutment

ヒーリングアバットメント

P.D(φ)	H (mm)	Ref.C
Ø4.0	3	AANHAF0403
	4	AANHAF0404
	5	AANHAF0405
	6	AANHAF0406
	7	AANHAF0407
Ø5.0	3	AANHAF0503
	4	AANHAF0504
	5	AANHAF0505
	6	AANHAF0506
	7	AANHAF0507
Ø6.0	3	AANHAF0603
	4	AANHAF0604
	5	AANHAF0605
	6	AANHAF0606
	7	AANHAF0607

P.D(φ)	H (mm)	Ref.C
Ø7.0	3	AANHAF0703
	4	AANHAF0704
	5	AANHAF0705
	6	AANHAF0706
	7	AANHAF0707
Ø8.0	3	AANHAF0803
	4	AANHAF0804
	5	AANHAF0805
	6	AANHAF0806
	7	AANHAF0807
Ø10.0	3	AANHAF1003
	4	AANHAF1004
	5	AANHAF1005
	6	AANHAF1006
	7	AANHAF1007

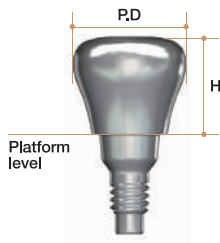

Abutment & Prosthetic Options




Abutment & Prosthetic Options

Transfer Impression Coping

トランスファーインプレッションコーピング

(クロースドトレイ用トランスファータイプガイドピン付属)


P.D(φ)	H (mm)	Type	Ref.C
Ø4.0	12	(1.2 Hex)	AANITH4012HT
	16		AANITH4016HT
Ø5.0	12		AANITH5012HT
	16		AANITH5016HT

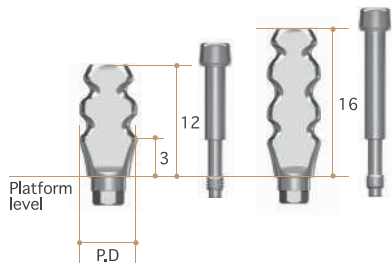

Temporary Abutment(チタン)

テンポラリーアバットメント(チタン)

P.D(φ)	C.H (mm)	P.H (mm)	Type	Ref.C
φ 4.0	2	10	Hex	AANTMH4012T
			Non-Hex	AANTMN4012T

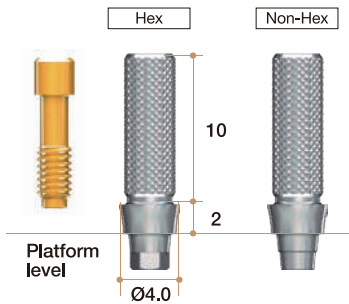

Lab Analog

ラボアナログ

P.D(φ)	Color	Ref.C
φ 3.5~φ 6.5	Blue	AANLAF4055




Pick Up Impression Coping

ピックアップインプレッションコーピング

(オープントレイ用ピックアップタイプガイドピン付属)


P.D(φ)	H (mm)	Type	Ref.C
Ø4.0	12	Hex	AANIPH4012T
	16		AANIPH4016T
	12	Non-Hex	AANIPN4012T
	16		AANIPN4016T
Ø5.0	7	Hex	AANIPH5007T
	12		AANIPH5012T
	7	Non-Hex	AANIPN5007T
	12		AANIPN5012T

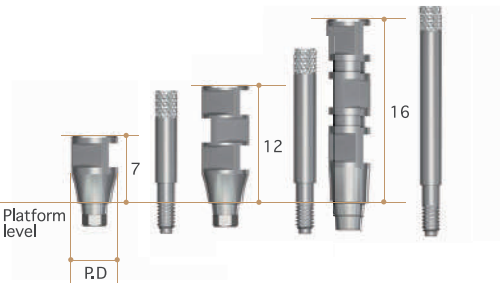

Peek Temporary Abutment (プラスチック)

ピークテンポラリーアバットメント(プラスチック)

P.D(φ)	C.H (mm)	P.H (mm)	Type	Ref.C
φ 5.0	1	11	Hex	AANTAH5012T

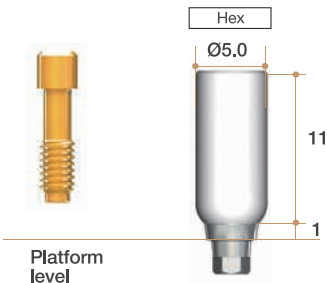


Abutment & Prosthetic Options

EZ Post

イーザーポスト

P.D (φ)	C.H (mm)	P.H (mm)	Type	Ref.C
φ 4.0	2	5.5	Hex	AANEPH4025L
	3			AANEPH4035L
	4			AANEPH4045L
	5			AANEPH4055L
	2	7		AANEPH4027L
	3			AANEPH4037L
	4			AANEPH4047L
	5			AANEPH4057L


P.D(φ)	C.H (mm)	P.H (mm)	Type	Ref.C
φ 5.0	2	5.5	Hex	AANEPH5025L
	3			AANEPH5035L
	4			AANEPH5045L
	5			AANEPH5055L
	2	7		AANEPH5027L
	3			AANEPH5037L
	4			AANEPH5047L
	5			AANEPH5057L

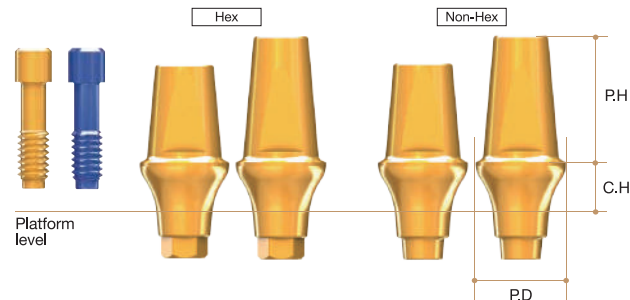

Angled Abutment

アングラアバットメント

P.D(φ)	C.H (mm)	P.H (mm)	Type	Ref.C
φ 4.0	2	7	Hex	AANA AH4215L
	3			AANA AH4315L
	4			AANA AH4415L
	5			AANA AH4515L
	2			AANA AH4225L
	3			AANA AH4325L
	4			AANA AH4425L
	5			AANA AH4525L

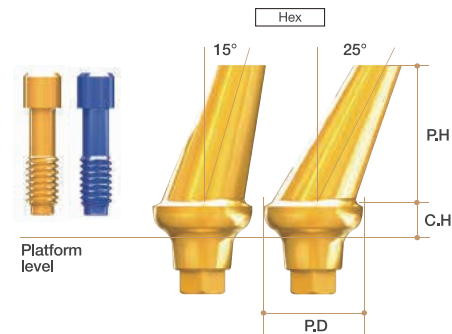


AnyRidge[®] Surgical Kit

Surgical Kit : Full Type (KARIN3001)

サージカルキット

ストップードリルでより簡単・安全に、必要な深さまでドリリングを行うことができます

Ref.C
KARIN3001

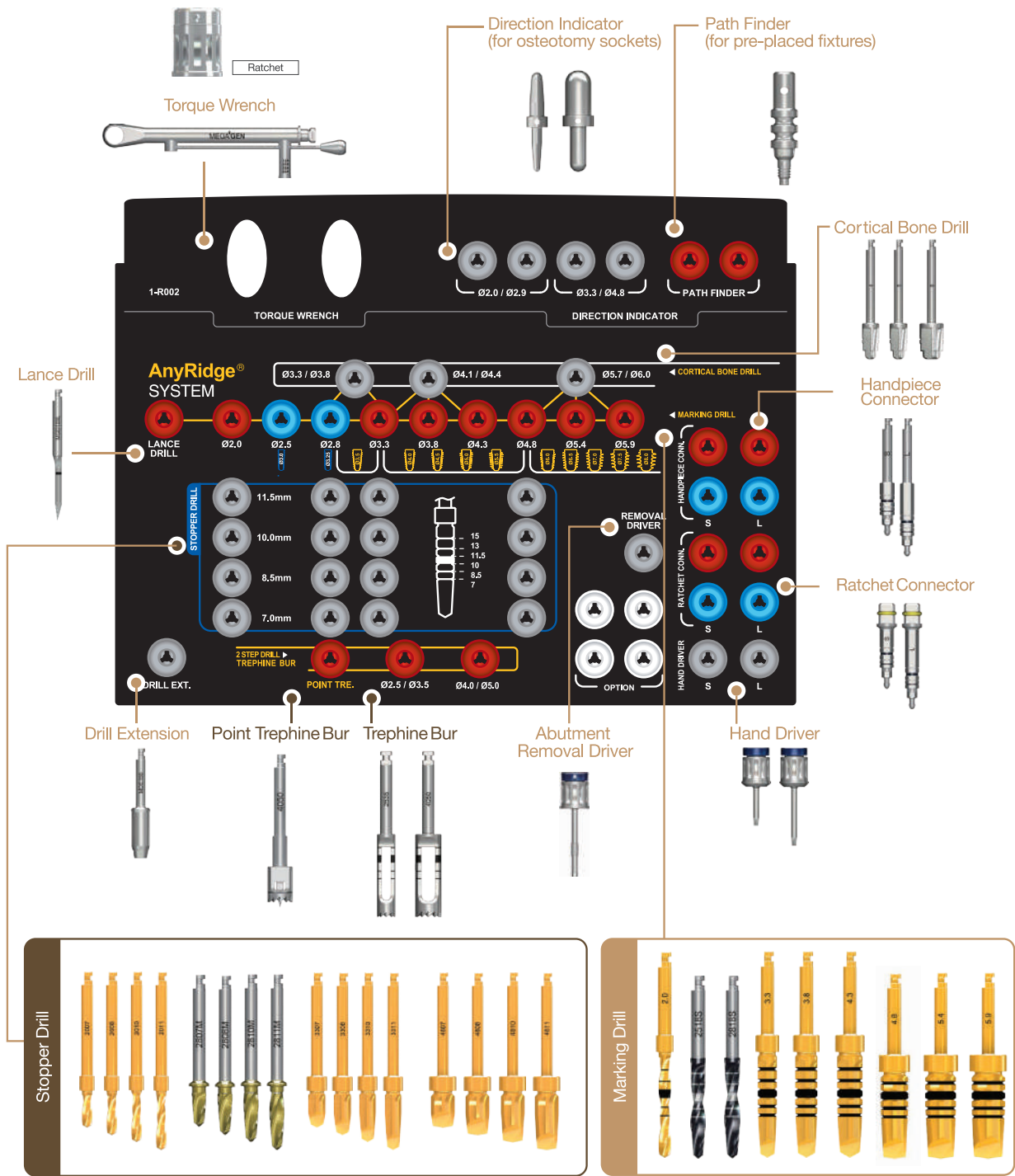


Surgical Components

Lance Drill

ランスドリル

- ・皮質骨に正確なドリル位置を確定させる上での目印をつくることに役立ちます
- ・皮質骨に起始点を形成するのに使用します

Diameter	Type	Ref.C
Ø2.0	Long	MGD100L

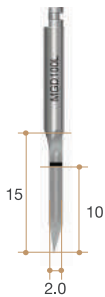

Marking Drill

マーキングドリル

- ・ドリル目盛: 7.0~18.0mm


Diameter	Length (mm)	Ref.C
Ø2.0	18	TANTDF2018
Ø2.5		SD2518S
Ø2.8		SD2818S
Ø3.3		TANSDF3318
Ø3.8		TANSDF3818
Ø4.3		TANSDF4318
Ø4.8	15	TANSDF4815
Ø5.4		TANSDF5415
Ø5.9		TANSDF5915



Stopper Drill

ストップードリル

Diameter	Length (mm)	Ref.C
Ø2.0	7	TANTDF2007
	8.5	TANTDF2008
	10	TANTDF2010
	11.5	TANTDF2011
Ø2.8	7	SD2807M
	8.5	SD2808M
	10	SD2810M
	11.5	SD2811M
Ø3.3	7	TANSDF3307
	8.5	TANSDF3308
	10	TANSDF3310
	11.5	TANSDF3311
Ø4.8	7	TANSDF4807
	8.5	TANSDF4808
	10	TANSDF4810
	11.5	TANSDF4811

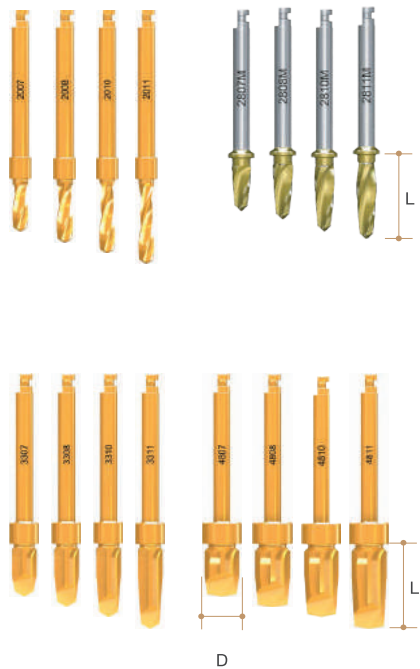

Surgical Components

Point Trephine Bur

ポイントトレフィンバー

Diameter	Ref.C
Ø5.0 (In.Ø4.0)	SPTB4050



Trephine Bur

トレフィンバー

- 自家骨の採取に役立ちます
- 破損したフィクスチャーを取り除きます
- 目盛:7,8.5,10,11.5,13mm(フィクスチャー同様)
- ドリル軸上のマーキングは、トレフィンバーの内径/外径を表します

Diameter	Type	Ref.C
Ø3.5 (in Ø2.5)	Short	TANTBL2535
Ø5.0 (in Ø4.0)		TANTBL4050
Ø6.0 (in Ø5.0)		*TANTBL5060
Ø7.0 (in Ø6.0)		*TANTBL6070
Ø3.5 (in Ø2.5)	Long	*TANTBE2535
Ø5.0 (in Ø4.0)		*TANTBE4050
Ø6.0 (in Ø5.0)		*TANTBE5060
Ø7.0 (in Ø6.0)		*TANTBE6070

(*) 別売 ※サージカルキットには含まれておりません




Cortical Bone Drill

コーチカルボーンドリル(カウンターシンク)

- 特に硬い骨の場合、皮質骨を取り除くのに使用します
- 各ドリルは2段階の直径サイズを有しています

Diameter	Ref.C
Ø3.5	TANCDL3500
Ø4.0~ Ø5.5	TANCDL4055
Ø6.0~ Ø8.0	TANCDL6080

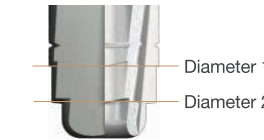

Surgical Components


Handpiece Connector

ハンドピースコネクター

- フィクスチャーを埋入する際、トルクを与える上で利用
- 簡単かつ安全なピックアップと埋入
- マウントを使用せずインプラント埋入の際に利用
- ハンドピースでフィクスチャーと埋入する際に利用します

Length (mm)	Type	Ref.C
5	*Ultra short	TANHCU
10	Short	TANHCS
15	Long	TANHCL

(*) 別売 ※サージカルキットには含まれておりません

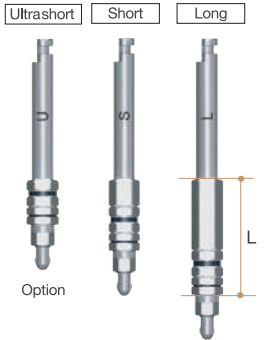


Ratchet Connector

ラチェットコネクター

- ラチェットレンチを用いてフィクスチャーを埋入する際に使用します

Length (mm)	Type	Ref.C
6	*Ultra short	TANREU
10	Short	TANRES
15	Long	TANREL

(*) 別売 ※サージカルキットには含まれておりません

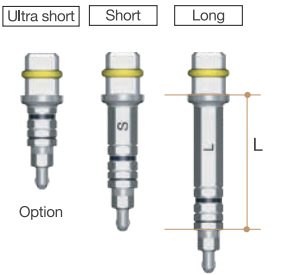

Hand Driver (1.2 Hex)

ハンドドライバ


- すべてのカバースクリュー
- アパットメントスクリュー
- ヒーリングアパットメントに使用します

- アダプターを使用せずトルクレンチに直接接続可能

- Hexは45Ncm以上での使用はご遠慮ください

Length (mm)	Type	Ref.C
5	*Ultra-short	TCMH DU1200
10	Short	TCMH DS1200
15	Long	TCMH DL1200
20	*Extra-long	TCMH DE1200

(*) 別売 ※サージカルキットには含まれておりません

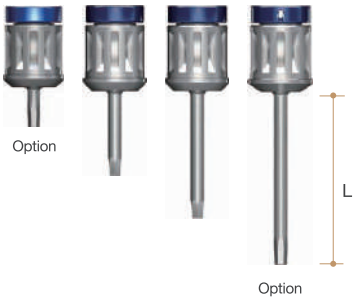

Surgical Components

Abutment Removal Driver

アバットメントリムーバードライバー

- アバットメントスクリュー取り外し後、最終的なアバットメントの取り外しに使用
- アバットメントにまっすぐ挿入し、時計回りに回します

Length (mm)	Ref.C
17.5	TANMRD18
25.0	*TANMRD25

(*) 別売 ※サージカルキットには含まれておりません



Drill Extension

ドリルエクステンション

- ドリル、その他のハンドピースツールを延長します
- 35N/cm以上で使用

Ref.C
MDE150




Direction Indicator

ディレクションインディケーター

- ドリリングの位置と方向を確認

Length (mm)	Ref.C
Ø1.9 / Ø2.8	MDI2029
Ø3.2 / Ø4.7	MDI3348

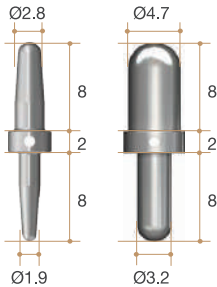


Path Finder

パスファインダー

- フィクスチャーを埋入後、パスファインダーを接続する事で平行性を確認する事ができます
- フラップレス手術の場合、溝部分で歯肉の深さを測ることができます

Length (mm)	Ref.C
10	TANPFF3580

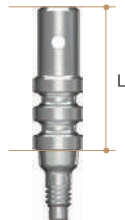


Torque Wrench & Adapter

トルクレンチ&アダプター

- トルクレンチには15Ncmから45Ncmのトルクオプションがあり、インプラント埋入とアバットメントスクリューの最終的な締め付けに使用します

Type	Ref.C
Torque Wrench	MTW300AT

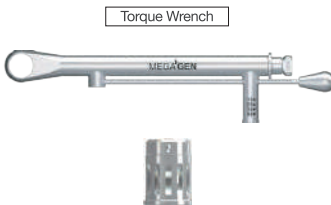


MEGAGEN JAPAN
For Lifetime Smiles

MEGA ISQ II™

非接触インプラント安定性測定器

Save the life with the traffic signal
Safe device for implant treatments

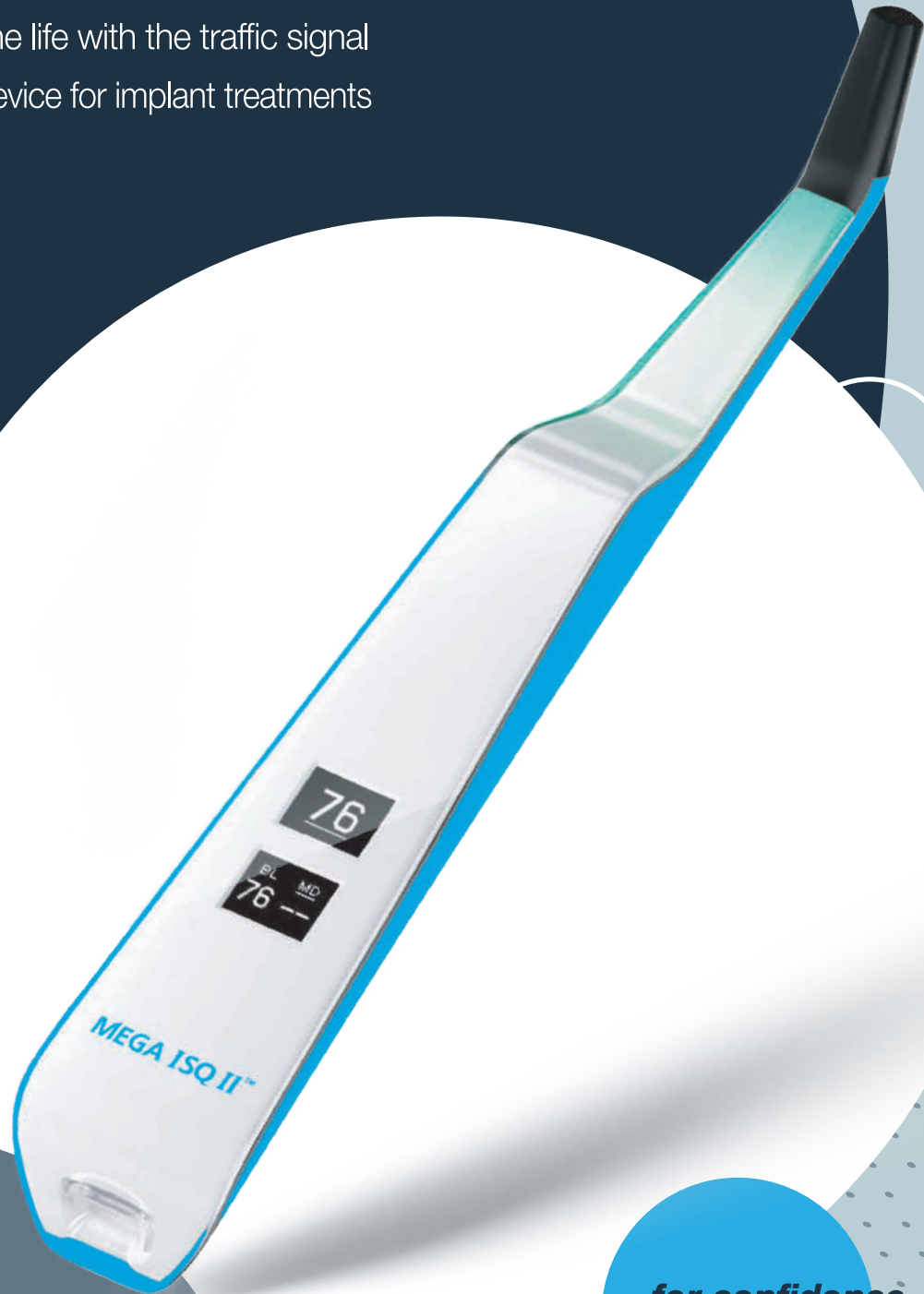

**for confidence
in implant surgery.**

歯接触分析装置

MEGA ISQ2™


販売名：メガ ISQ2

一般的名称：歯接触分析装置 70700000


医療機器届出番号：40B1X10003GE0114

医療機器の分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

メガISQ II は非接触で正確なインプラントの安定性「ISQ値」を測定することが可能です。
Comfortable, fast and easy to use.

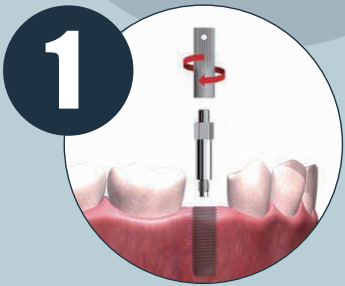


スマートペグマウントを用いて、
スマートペグをインプラントに連結します。

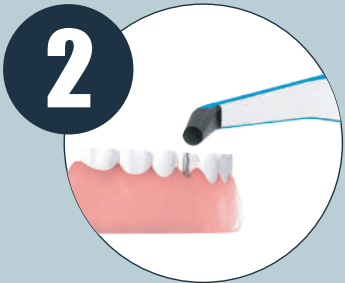

プローブから磁気を発し、共振周波数を測定します。



ISQ値『インプラント安定指数』が測定され、ディスプレイに表示されます。

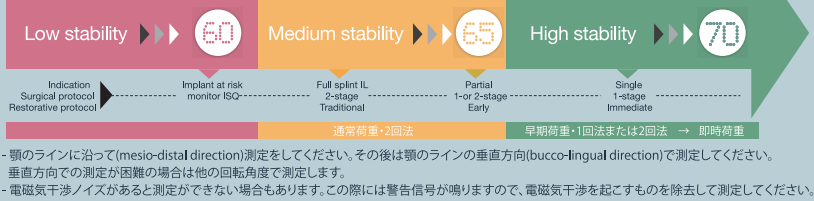

- 顎のラインに沿って(mesio-distal direction)測定をしてください。その後は顎のラインの垂直方向(bucco-lingual direction)で測定してください。
垂直方向での測定が困難の場合は他の回転角度で測定します。
- 電磁気干渉ノイズがあると測定ができない場合があります。この際には警告信号が鳴りますので、電磁気干渉を起こすものを除去して測定してください。

客観的な数値で安定性を評価し
荷重時期を計画することができます。



歯接触分析装置
MEGA ISQ2™

販売名：メガ ISQ2
一般的名称：歯接触分析装置 70700000
医療機器届出番号：40B1X10003GE0114
医療機器の分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

Description	Ref.C
MEGA ISQ2	OSSTELL-ISQ2
* AnyOne type	OSSTELL-AO77
Smart Peg	* AnyRidge type
	OSSTELL-AR67

(※) 別売 スマートペグ



Fax Order

MEGA^{AI}GEN J A P A N
For Lifetime Smiles

FAX : 06-6266-3536

ご注文日	20 年 月 日 ()	ご担当者名	様
医院名			
ご住所	〒		
TEL		FAX	
希望納期	特になし / 20 年 月 日 () 午前・午後		

ご請求先と納品先が異なる場合は、ご記入ください。

納品先名	
ご住所・TEL	〒 TEL ()

- * FAX注文受付時間：月曜日～金曜日 9:00～16:00
- * 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- * 納品日に関しましては地域・天候・その他交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- * 返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。
- * 一回のご注文が10,000円以下(税別)の場合、送料700円(税別)をご請求させていただきます。
- * タイム便は別途300円(税別)が必要となります。
- * その他ご不明点等ありましたらお問い合わせください。平日9:00～18:00 TEL:06-6266-3535

	製造番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				